



Návod k obsluze



Jordan řada A

Jordan A1, Jordan A3, Jordan A wood

Varianty zdravotnického prostředku:

Jordan A1

Jordan A3

Jordan A wood

Určený účel zdravotnického prostředku:

Stoly Jordan A jsou určeny pro využití ve zdravotnických zařízeních jako vyšetřovací lehátka, dále pak k rehabilitaci a fyzioterapii za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu. Stoly vyhovují pro masáže a lázeňské procedury. Stoly Jordan je možno použít i pro potřebu ambulantní chirurgie u zákroků bez narkózy, kdy je pacient při plném vědomí.



Důležité upozornění. Stoly Jordan nejsou určeny pro použití ve výbušném prostředí, nejsou vhodné k použití za přítomnosti hořlavých směsí anestetika a vzduchu nebo hořlavé směsi anestetika a kyslíku, příp. oxidu dusného.

Riziková třída:

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS je výrobek zdravotnickým prostředkem, zařazeným do rizikové třídy I podle přílohy VIII.

Sterilita zdravotnického prostředku:

Výše uvedený zdravotnický prostředek je uváděn na trh jako NESTERILNÍ.

Měřicí funkce:

Výše uvedený zdravotnický prostředek je uváděn na trh jako NEMĚŘICÍ.

Technické parametry:

Hmotnost lehátka	cca 35 kg
Základní rozměr*	200 x 65 cm
Maximální zátěž lehátka	180 kg

* rozměr se může lišit dle požadavku odběratele

Postup při instalaci lehátka:

1. Sejmeme obalový materiál.



2a. Podhlavník dáme do vodorovné polohy přidržením ovládací páčky (A3).



2b. Zpět do vodorovné polohy dáme podhlavník vyzvednutím do horní úvratě a sklopením (A1, A wood).



3. Pomocí vyrovnávacího šroubu vyrovnáme nerovnost podlahy.



Podhlavník je konstrukčně řešen na **max. zátěž 60 kg**. Při přetížení může nastat propad pístu nebo jeho znehodnocení.

Varianty zdravotnického prostředku



Jordan A1



Jordan A3



Jordan A wood

Nastavení podhlavníku

Jordan A1



Jordan A wood



Podhlavník vysouváme nahoru, lze polohovat v 5 polohách.

Zpět do vodorovné polohy dáme podhlavník vy-
zvednutím do horní úvratě a sklopením.

Jordan A3




Zdvih a sklápění podhlavníku provádíme přidrž-
ením ovládací páčky. Po jejím uvolnění je podhlav-
ník v poloze zafixován.

Nastavení držáku hygienického papíru



Povolením okřídlené matky uvolníme jezdce držáku hygienického papíru a přizpůsobíme velikosti papíru.

Nastavení koleček

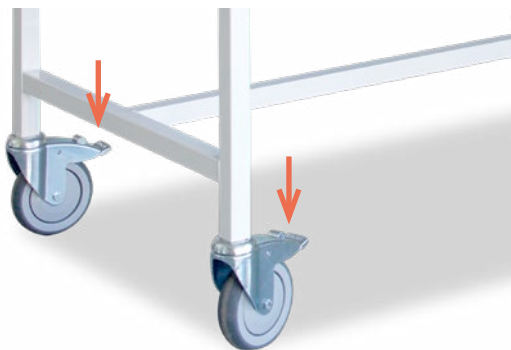

Kolečko s brzdou. Sešlápnutím zabrzdíme.

Možná závada a její odstranění:

Pokud podhlavník nedrží polohu už při malé zátěži, pak pootočením tělesa plynového pístu ve směru hodinových ručiček lze nastavit tlak v pružině a tím i sílu odporu pružiny.

V případě trvání závady volejte servis.

RESI Třeboň spol. s r. o. T +420 384 724 292
E info@resi.cz www.resi.cz

Bezpečnostní pokyny

- Používat a obsluhovat přístroj nesmějí děti.
- Nepřetěžovat povolenou max. hranici zatížení 180 kg.
- Nesedat na podhlavník, jeho maximální zatížení je 60 kg, může dojít k úrazu nebo trvalému poškození lehátka.

Zvláštní podmínky pro skladování a údržbu:

Kvalitní lehátka vyžadují řádnou péči, aby nedocházelo k předčasnému znehodnocení.

- Lehátka chraňte před nadměrným vlhkem a teplem.
- Čalounění chraňte před nárazy o ostré hrany ostatního nábytku a před působením slunečních paprsků.
- Pro trvalou radost s vaším lehátkem čistěte koženkový povrch pravidelně. Znečištění olejem, tukem a inkoustem musí být ihned odstraněno. Čistěte teplou mýdlovou vodou a hadříkem z mikrovlákna nebo měkkým kartáčkem na ruce.
- **Nepoužívejte rozpouštědla, chloridy, abraziva, chemické čisticí prostředky nebo vosková leštidla.**

Upozornění: na obarvení od jeansů nebo jiných textilií se nevztahuje reklamace.

Výstrahy a jiná důležitá upozornění:



Záruka, podmínky záruky:

Poskytovatelé (zdravotní péče) jsou povinni zajistit tyto podmínky 2leté záruky:

Instalovat, používat a udržívat zdravotnické prostředky jen k určenému účelu použití a v souladu s provozními předpisy (návodem) výrobce a předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vést provozní dokumentaci zdravotnického prostředku.

Výrobce vyžaduje BTK (bezpečnostně technickou kontrolu) našim certifikovaným pracovníkem 1x za 10 let.

Životnost lehátka je max. 15 let. Po této době výrobce neručí za jakékoliv závady.



Upozornění! Nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé neodbornou obsluhou nebo ošetřováním.



Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž je pacient usazen.

Materiály, obaly, odpady z obalů

Výrobek neobsahuje ve smyslu směrnice RoHS 2011/65/EU, ve znění směrnice 2015/863, o omezení používání olova a dalších potenciálně nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích, žádné nebezpečné látky na bázi kadmia, rtuti, azbestu, polybromovaných nebo polychlorovaných bifenylů, freonů, olova, šestimocného chromu, a výrobek neohrožuje životní prostředí. Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Po rozbalení výrobku je rozřídíte podle uvedených grafických symbolů na nich a předejte k dalšímu využití – recyklaci oprávněné osobě.



Výrobek je označen tímto recyklačním symbolem s významem: obsahuje materiály, které lze dále využít – recyklovat.

Pro likvidaci zařízení po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, nebo využijte služeb sběrných nebo recyklačních dvorů.



Zařízení není určeno k odstranění jako součást komunálního (domovního) odpadu.

Číslo verze návodu k použití: 2.2

Datum vydání návodu k použití: 01. 03. 2023



VÝROBCE



Resi

RESI Třeboň spol. s r. o.
Novohradská 1153,
379 01 Třeboň, Czech Republic
T +420 384 724 292 www.resi.cz