



Návod k obsluze



Jordan řada H

gynekologická lehátka

H, H2e, H23e, H3e uni, H3e ultrazvuk

Varianty zdravotnického prostředku:

**Jordan H, Jordan H2e,
Jordan H23e, Jordan H3e uni,
Jordan H3e ultrazvuk**

Určený účel zdravotnického prostředku:

Stoly řady Jordan H jsou určeny do zdravotnických zařízení pro gynekologii a urologii v ambulantní praxi a provádění běžných výkonů i jako vyšetřovací lehátka za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu.

Jordan H3e ultrazvuk je vyšetřovací lehátko speciálně k vyšetření ultrazvukem.



Důležité upozornění. Stoly Jordan nejsou určeny pro použití ve výbušném prostředí, nejsou vhodné k použití za přítomnosti hořlavých směsí anestetika a vzduchu nebo hořlavé směsi anestetika a kyslíku, příp. oxidu dusného.

Riziková třída:

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS je výrobek zdravotnickým prostředkem, zařazeným do rizikové třídy I podle přílohy VIII.

Sterilita zdravotnického prostředku:

Výše uvedený zdravotnický prostředek je uváděn na trh jako NESTERILNÍ.

Měřicí funkce:

Výše uvedený zdravotnický prostředek je uváděn na trh jako NEMĚŘICÍ.



Elektricky ovládaná lehátka jsou zařazena do elektrické třídy II.

Technické parametry	H, H2e	H23e	H3e uni, H3e ultrazvuk
Hmotnost lehátka kg	80	80	90
Základní rozměr cm	127x65	186x65	200x65
Max. zátěž lehátka kg	180		

Postup při instalaci lehátka:

1. Sejmeme obalový materiál.



2. Pomocí vyrovnávacího šroubu vymezíme nerovnost podlahy.

3. Vložíme šauty a přitáhneme ve vyhovující poloze.



4. Nasuneme područky na konstrukci (H, H23e).

5. Při instalaci je třeba dbát na to, aby napájecí kabel nebyl v možné kolizi s mechanickými částmi lehátka.

Varianty zdravotnického prostředku



Jordan H



Jordan H23e



Jordan H2e



Jordan H3e uni



Jordan H3e ultrazvuk

Nastavení výšky lehátka

Lehátko s elektromotorem. Výška lehátka se nastavuje pomocí ručního nebo nožního ovladače.




Nožní ovladač



Ruční ovladač

Opěrka hlavy

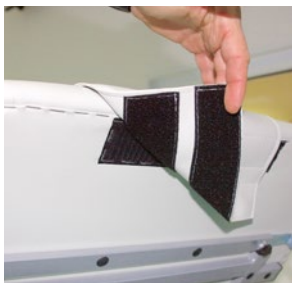

Opěrku hlavy připevníme suchým zipem

Nerezová miska




Miska je snadno vyjímatelná

Bezpečnostní skříňka



Bezpečnostní vypínací skříňka je osazena vyndávacím magnetickým kolíčkem. Po jeho vytažení zamezíte spuštění elektromotoru a tím minimalizujete riziko zranění nepověřeně osoby mezi horním a spodním rámem lehátka.

Nastavení držáku hygienického papíru

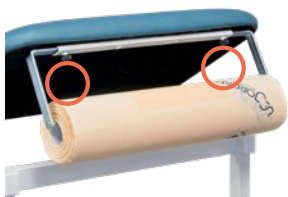

Povolením okřídlené matky uvolníme jezdce držáku hygienického papíru a přizpůsobíme velikosti papíru.

Nastavení koleček



Sešlápnutím pedálu vysuneme kolečka a můžeme lehátkem manipulovat. Vyšlápnutím pedálu lehátko opět zafixujeme (Jordan H3e).

Přidání nožního dílu



Po vyjmutí nožních podpěr z křesla lze zasunout nožní segment (viz obr.) pro přeměnu na lehátko.

Lze tak docílit i Trendelenburgovu polohu (H23e)

Možná závada a její odstranění:

Pokud podhlavník nadržuje polohu už při malé zátěži, pak pootočením tělesa plynového pístu ve směru hodinových ručiček lze nastavit tlak v pružině a tím i sílu odporu pružiny.

V případě trvání závady volejte servis.

RESI Třeboň spol. s r. o. T +420 384 724 292
E info@resi.cz www.resi.cz

Zvláštní podmínky pro skladování a údržbu:

Kvalitní lehátka vyžadují řádnou péči, aby nedocházelo k předčasnému znehodnocení.

- Lehátka chraňte před nadměrným vlhkem a teplem.
- Čalounění chraňte před nárazy o ostré hrany ostatního nábytku a před působením slunečních paprsků.
- Pro trvalou radost s vaším lehátkem čistěte koženkový povrch pravidelně. Znečištění olejem, tukem a inkoustem musí být ihned odstraněno. Čistěte teplou mýdlovou vodou a hadříkem z mikrovlákna nebo měkkým kartáčkem na ruce.
- **Nepoužívejte rozpouštědla, chloridy, abraziva, chemické čisticí prostředky nebo vosková leštidla.**

Upozornění: na obarvení od jeansů nebo jiných textilií se nevztahuje reklamace.

Výstrahy a jiná důležitá upozornění:



Záruka, podmínky záruky:

Poskytovatelé (zdravotní péče) jsou povinni zajistit tyto podmínky 2leté záruky:

Instalovat, používat a udržovat zdravotnické prostředky jen k určenému účelu použití a v souladu s provozními předpisy (návodem) výrobce a předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vést provozní dokumentaci zdravotnického prostředku.

U lehátek výrobce stanovuje provádět nejméně jednou za 24 měsíců BTK (bezpečnostně technickou kontrolu).

Lehátka, která nejsou výškově stavitelná se BTK vyžaduje našim certifikovaným pracovníkem 1x za 10 let (Jordan H).

Životnost lehátka je max. 15 let. Po této době výrobce neručí za jakékoliv závady.



Upozornění! Nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé neodbornou obsluhou nebo ošetřováním.



Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je pacient usazen.

Materiály, obaly, odpady z obalů

Výrobek neobsahuje ve smyslu směrnice RoHS 2011/65/EU, ve znění směrnice 2015/863, o omezení používání olova a dalších potenciálně nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích, žádné nebezpečné látky na bázi kadmia, rtuti, azbestu, polybromovaných nebo polychlorovaných bifenyly, freonů, olova, šestimocného chromu, a výrobek neohrožuje životní prostředí. Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Po rozbalení výrobku je roztrďte podle uvedených grafických symbolů na nich a předejte k dalšímu využití – recyklaci oprávněné osobě.



Výrobek je označen tímto recyklačním symbolem s významem: obsahuje materiály, které lze dále využít – recyklovat.

Likvidace zařízení s elektrickým ovládáním

Vyšetřovací lehátka s elektrickým ovládáním nejsou elektrickým nebo elektronickým zařízením ve smyslu zákona o odpadech v platném znění. Pro likvidaci zařízení po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, nebo využijte služeb sběrných nebo recyklačních dvorů.



Zařízení není určeno k odstranění jako součást komunálního (domovního) odpadu.

Číslo verze návodu k použití: 2.2

Datum vydání návodu k použití: 01. 03. 2023



VÝROBCE



Resi

RESI Třeboň spol. s r. o.
Novohradská 1153,
379 01 Třeboň, Czech Republic
T +420 384 724 292 www.resi.cz