



Návod k obsluze



Jordan řada T

Jordan T3e, T3 simple, T3 ORL, O3

Varianty zdravotnického prostředku:

Jordan T3e, T3 simple, T3 ORL, O3

Určený účel zdravotnického prostředku:

Křesla Jordan jsou určeny pro využití ve zdravotnických zařízeních jako vyšetřovací i tranzfuzní odběrová křesla s pevnou výškou nebo nastavitelnou výškou.

Tato křesla jsou zdravotnický prostředek, který je určen do nemocnic, tranzfuzních stanic, odběrů krevní plazmy, ORL ambulancí a dalších zdravotnických zařízení.



Důležité upozornění. Křesla Jordan nejsou určena pro použití ve výbušném prostředí, nejsou vhodná k použití za přítomnosti hořlavých směsí anestetika a vzduchu nebo hořlavé směsi anestetika a kyslíku, příp. oxidu dusného.

Riziková třída:

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS je výrobek zdravotnickým prostředkem, zařazeným do rizikové třídy I podle přílohy VIII.

Sterilita zdravotnického prostředku:

Výše uvedený zdravotnický prostředek je uváděn na trh jako NESTERILNÍ.

Měřicí funkce:

Výše uvedený zdravotnický prostředek je uváděn na trh jako NEMĚŘICÍ.



Elektricky ovládaná lehátka jsou zařazena do elektrické třídy II.

Technické parametry:

Hmotnost křesla	cca 80 kg
Základní rozměr*	200 x 65 cm
Maximální zátěž křesla	180 kg

* rozměr se může lišit dle požadavku odběratele

Postup při instalaci křesla:

1. Sejmeme obalový materiál.



2. Vložíme šauty do otvoru a přitáhneme ve vhodující poloze.

3. Připevníme půlválec suchým zipem.

Varianty zdravotnického prostředku



Jordan T3e



Jordan T3 simple



Jordan T3 ORL

Nastavení výšky křesla


Jordan T3 simple, T3 ORL, O3. Výška křesla je pevná.

Jordan T3e. Výška transfuzního křesla se provádí elektromotorem pomocí ručního ovladače. Elektromotor má bezpečnostní spojku, která zabrání dalšímu snižování výšky v případě, kdy narazí na překážku (končetina pod stolem v konstrukci atp.). Spojka bude pouze prokluzovat. Skřípnutí nastane pouze vlastní vahou ocalouněné horní desky.



Nastavení nožního a zádového segmentu

Jordan T3 simple, T3 ORL.

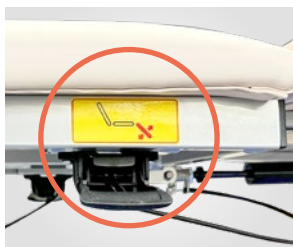


Sklon nožního dílu se nastavuje zmáčknutím ovladače, po nastavení požadované polohy ovladač uvolníme.



Sklon zádového dílu se nastavuje zmáčknutím ovladače, po nastavení požadované polohy ovladač uvolníme.

Jordan O3

Sklon nožního a zadního dílu se nastavuje synchronně plynovou vzpěrou.

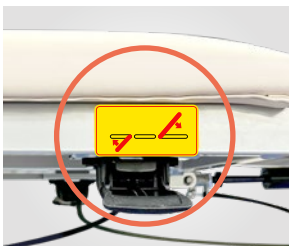

Jordan T3e



Sklon sedací části a zádového segmentu se nastavuje elektromotorem pomocí ručního ovladače.



Maximální zatížení nastaveného nožního i zádového dílu je 60 kg. (Nesedat!)



Jordan T3 simple, O3.
Přizvednutím křesla na zadní dvě kolečka jím můžeme snadno manipulovat bez pacienta.



Jordan T3e, T3 ORL.
Sešlápnutím brzdy kolečka křeslo zafixujeme.



Povolením okřídlené matky uvolníme jezdce držáku hygienického papíru a přizpůsobíme velikosti papíru.

Možná závada a její odstranění:

Jordan T3 simple, O3: pokud zádová nebo nožní část nedoradí polohu už při malé zátěži, pak pootočením tělesa plynového pístu ve směru hodinových ručiček lze nastavit tlak v pružině a tím i sílu odporu pružiny.

V případech trvání závady volejte servis.

RESI Třeboň spol. s r. o. T +420 384 724 292
E info@resi.cz www.resi.cz

Bezpečnostní pokyny

- Používat a obsluhovat přístroj nesmějí děti.
- Nepřetěžovat povolenou max. hranici zatížení 180 kg.
- Nesedat na podhlavník, jeho maximální zatížení je 60 kg, může dojít k úrazu nebo trvalému poškození lehátka.

Zvláštní podmínky pro skladování a údržbu:

Kvalitní lehátka vyžadují řádnou péči, aby nedocházelo k předčasnému znehodnocení.

- Lehátka chraňte před nadměrným vlhkem a teplem.
- Čalounění chraňte před nárazy o ostré hrany ostatního nábytku a před působením slunečních paprsků.
- Pro trvalou radost s vaším lehátkem čistěte koženkový povrch pravidelně. Znečištění olejem, tukem a inkoustem musí být ihned odstraněno. Čistěte teplou mýdlovou vodou a hadříkem z mikrovlákna nebo měkkým kartáčkem na ruce.
- **Nepoužívejte rozpouštědla, chloridy, abraziva, chemické čistící prostředky nebo vosková leštidla.**

Upozornění: na obarvení od jeansů nebo jiných textilií se nevztahuje reklamace.

Výstrahy a jiná důležitá upozornění:



Záruka, podmínky záruky:

Poskytovatelé (zdravotní péče) jsou povinni zajistit tyto podmínky 2leté záruky:

Instalovat, používat a udržívat zdravotnické prostředky jen k určenému účelu použití a v souladu s provozními předpisy (návodem) výrobce a předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vést provozní dokumentaci zdravotnického prostředku.

Jordan T3 simple, T3 ORTL, O3 Výrobce vyžaduje BTK (bezpečnostně technickou kontrolu) našim certifikovaným pracovníkem 1x za 10 let.

Jordan T3e Výrobce stanovuje provádět nejméně jednou za 24 měsíců BTK.

Životnost lehátka je max. 15 let. Po této době výrobce neručí za jakékoliv závady.



Upozornění! Nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé neodbornou obsluhou nebo ošetřováním.



Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je pacient usazen.

Materiály, obaly, odpady z obalů

Výrobek neobsahuje ve smyslu směrnice RoHS 2011/65/EU, ve znění směrnice 2015/863, o omezení používání olova a dalších potenciálně nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích, žádné nebezpečné látky na bázi kadmia, rtuti, azbestu, polybromovaných nebo polychlorovaných bifenyly, freonů, olova, šestimocného chromu, a výrobek neohrožuje životní prostředí. Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Po rozbalení výrobku je roztrídíte podle uvedených grafických symbolů na nich a předejte k dalšímu využití – recyklaci oprávněné osobě.



Výrobek je označen tímto recyklačním symbolem s významem: obsahuje materiály, které lze dále využít – recyklovat.

Likvidace zařízení s elektrickým ovládáním

Vyšetřovací lehátka s elektrickým ovládáním nejsou elektrickým nebo elektronickým zařízením ve smyslu zákona o odpadech v platném znění. Pro likvidaci zařízení po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, nebo využijte služeb sběrných nebo recyklačních dvorů.



Zařízení není určeno k odstranění jako součást komunálního (domovního) odpadu.

Číslo verze návodu k použití: 2.2

Datum vydání návodu k použití: 01. 03. 2023



VÝROBCE



Resi

RESI Třeboň spol. s r. o.
Novohradská 1153,
379 01 Třeboň, Czech Republic
T +420 384 724 292 www.resi.cz